

Transport Stretcher

Model 747 トランスポートストレッチャー



少しの余裕がケアに表れる

軽い力で移動できたら、スムーズに運転できたら、しっかり停車してくれたら、簡単に背上げ・昇降できたら、ワンランク上の仕様で日常のケア向上に貢献します。

注：オプションのウルトラコンフォートマットレスを取り付けています



四面コントローラ

四方すべてからブレーキ/移動/走行の切替えができます。しっかりした踏み込み感で、切替がしっかりとわかります。走行モードでは、ストライカーが発明した前後回転のみの第5車輪が中央に降り、スムーズな直進、方向転換ができます。



両側油圧昇降ペダル

左右の足踏み式油圧昇降ペダルで、患者様の様子を目視しながら容易に昇降できます。降下ペダルの踏み位置で、正逆トレンデンプルグの角度も直観的に調整できます。耐荷重 227kg で余裕あります。



空気圧式背上げ

背面の手動レバー操作で、空気圧アシストで容易に背上げできます。90度まで上がるため、患者の状態、処置に合わせて調整できます。折り畳み式サイドレールで、背上げ時の患者安全も確保できます。



4 輪同時ブレーキ

ブレーキ操作で、回転と旋回が四輪同時にロックされます。ストライカー独自の金属ギア旋回ブレーキで静止中のブレはほとんどありません。車輪側面を把持する回転ブレーキは走行面を潰さず長期使用での劣化を起こしません。

Transport Stretcher

Model 747 トランスポートストレッチャー



標準装備

- ABS樹脂製トレイ、ボンベトレイ付ベースカバー
- 20cm カバー付キャスター
- 縦型酸素ボンベホルダー (1115-130-000)
- 第5車輪操舵システム
- 4輪同時ブレーキ
- ハイ・ローペダル (左右)
- ブレーキ・ステアペダル (四方)
- 折り畳み式サイドレール
- IVポール取付穴 (5か所)
- フットボード取付穴 (2か所)
- 空気圧バックレスト (背上げ部)
- ポップアップ移動用ハンドル
- 一体型2段式IVポール (頭側)
- 着脱型IVポール 1本 (0390-025-010)
- スタンダードマットレス 7.6cm厚 (PC-1059-326-140)

仕様

カタログ番号	0747-000-000	
全長	211 cm	
全幅	76 cm	
本体重量 (付属品含まず)	113 kg	
耐荷重	227 kg	
昇降レンジ (寝台天面高、 マットレス含まず)	最高位	91 cm
	最低位	55 cm
背上げ角度	0~90°	
トレンデレンブルグ角度	± 18°	
寝台寸法	66×192 cm	
サイドレール寸法	33×140 cm	
キャスター径	20 cm	

オプション

カタログ番号	製品名	
0390-025-010	着脱型IVポール	737/747/プライム用
1704-034-601	ウルトラコンフォートSEマットレス	193 × 66 × 10 cm
1805-034-601	コンフォートゲルSEマットレス	193 × 66 × 14 cm
PC-1059-326-140	スタンダードマットレス	193 × 66 × 7.6 cm
1105-045-200	除細動器用トレイ	
1105-045-400	四役フットボード	機器トレイ / 記録台 / 延長ボード
1105-045-500	フットボード	チャートホルダー
1105-045-700	拡張型トレイ	プライム用
1105-045-800	拡張型トレイホルダー	1105-130-000 用
1115-130-000	縦型酸素ボンベホルダー	ストレッチャー用
0785-155-000	IVキャディ	ストレッチャー用 要取付作業

抑制帯もございます。詳細は担当営業までお問い合わせください。

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。

Literature Number: BD1-25
YN/MI 3m 10/17

Copyright © 2017 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: [Stryker medical professional site](http://Stryker.medical.professional.site)
www.stryker.co.jp/mp2/