

# VariAx 2 / AxSOS

## Locking Plate System



# CONTENTS

## Introduction P.3

---

## ブランド紹介 P.4-P.5

---

VariAx 2

AxSOS

## VariAx 2 P.6-P.23

---

橈骨遠位端プレート

鎖骨プレート

上腕骨遠位プレート

フィブラプレート

フットプレート

コンプレッションプレート

1/3 円プレート

ハンドプレート

## AxSOS P.24-P.41

---

上腕骨近位プレート

大腿骨遠位プレート

脛骨近位外側プレート

脛骨近位内側プレート

脛骨遠位前外側プレート

脛骨遠位内側プレート

コンプレッションプレート

## オスフェリオン 60 SYK P.40-P.41

# Plating that fits.

## Fit for patients

プレートは、さまざまな人種・年齢・性別の骨のCTデータを集めたSOMAを使用し、デザインされています。

## Fit for procedures

シンプルな手順で済むよう設計された器械によって、手術手順が合理化されます。

## Fit for you

必要なトレーニングを受けたStryker営業担当がきめ細かいサポートを提供します。

## Fit for the future

ポートフォリオは現在もさらなる進化を続けています。今後あらゆる部位でプレートシーンをリードしていきます。

# VariAx 2



## アノダイズドタイプⅡ加工

チタンプレートにさらに加工を施すことにより、軟部組織癒着を低減します。

## SOMAによるモルフォメトリックデザイン


様々な人種、年齢、性別の骨CTデータベースを用いてプレート形状のデザインと解析をしています。

## スマートロックテクノロジー

プレートスクリューホールに設けられた、純チタン製のリップとチタン合金製スクリューの組み合わせにより、最大振り角 $\pm 15^\circ$ のポリアクシャルロッキングを可能にしています。

## 合理的なプラットフォーム

- ロッキング、ノンロッキングスクリューを選択することが可能です。(同一のドリルを使用)
- 一つのスクリューホールに異なるサイズ(径)のスクリューが使用できます。

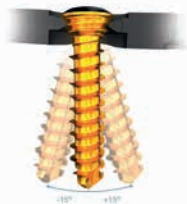

ロッキングスクリュー

## VariAx 2 スクリュープラットフォーム



キャンセラス ロッキング コーティカル



## ユニバーサルスクリューホール

3種類のスクリーが挿入可能なスクリーホールです。

(一部のノンロッキングホールは除く)

※すべて共通のドライバーを使用します。



## SOMAによるモルフォメトリックデザイン

様々な人種、年齢、性別の骨CTデータベースを用いてプレート形状のデザインと解析をしています。

## スムーズな抜去を考慮したデザイン

- ラウンド形状のスクリースレッドにより、ロッキング後のジャミングを最小限に抑えます。
- スクリューヘッドとスクリーのパッチが異なることで(ヘッド1:スクリー2)、コールドウェルディングを軽減します。
- コニカル形状のスクリーヘッドは、最終締結と抜去到必要なトルクを低く抑えます。
- アノダイズドタイプII加工により、軟部組織癒着を低減します。



\*ラウンド形状のスクリースレッド



## フレームフィクセーター

骨とプレート間のギャップを圧着させる専用の器械があります。

# VariAx 2

---

# VariAx 2



鎖骨プレート  
P.10

橈骨遠位端プレート  
P.8



上腕骨遠位端プレート  
P.12

コンプレッションプレート  
P.18



1/3 円プレート  
P.18




ハンドプレート  
P.20



フィブラプレート  
P.14



フットプレート  
P.16

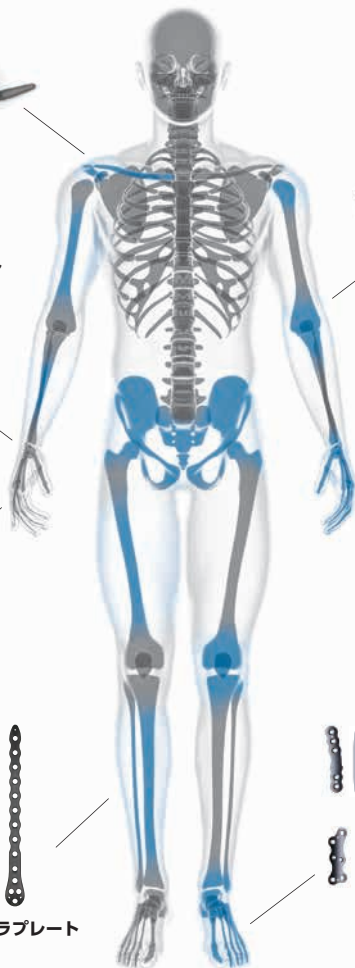

# VariAx 2 Distal Radius

## 橈骨遠位端プレート

### モルフォメトリックなポリアクシャルロッキングプレート

#### プレート長:

アナトミカルプレート - 55.6mm、75.9mm  
 (ミディアムナローのみ48.9mmがあります)  
 XXLプレート - 73.8mm~189mm

#### プレート厚\*:

2mm

#### プレート遠位幅:

スモール - 22mm  
 ミディアムナロー - 25mm  
 ミディアム - 27.5mm

#### プレートの設置:

ウォーターシェッドラインに沿って設置します。  
 2本のスクリューで橈骨茎状突起、プレートで月状骨を支えます。

#### シンプルな手術手順:

2.0mmのドリル、T8のドライバーのみでスクリューの挿入が行えます。



ミディアムナロー



#### 使用するスクリウスペック








スクリュー/ピン(T8、セルフタッピング)			
	ロッキングスクリュー	ノンロッキングスクリュー	ロッキングピン
サイズ	2.7mm	2.7mm	2.0mm
長さ	10mm-24mm	10mm-20mm	16mm-26mm
ドリル	2.0mm	2.0mm	2.0mm


製品リストはP.23を参照ください。



\*寸法は参考値です。



バリアックス橈骨遠位用ロッキングプレート

掌側プレート*1					
サイズ	カタログ番号	種類	規格 (mm)		
			幅	長さ	
	54-25673S	左・エクストラショート	25	48.9	
	54-25683S	右・エクストラショート			
	54-25374S	左・ショート	22	55.6	
	54-25384S	右・ショート			
	54-25674S	左・ショート	25	55.6	
	54-25684S	右・ショート			
	54-25376S	左・ショート	27.5	55.6	
	54-25386S	右・ショート			
	54-25375S	左・ロング	22	75.9	
	54-25385S	右・ロング			
	54-25677S	左・ロング	25	75.9	
	54-25687S	右・ロング			
	54-25377S	左・ロング	27.5	75.9	
	54-25387S	右・ロング			

掌側プレートXXL*2					
サイズ	カタログ番号	種類	規格 (mm)		
			幅	長さ	
	54-25436S	15穴 左	22	189	
	54-25438S	15穴 右			
	54-25440S	11穴 左		145	
	54-25442S	11穴 右			
	54-25444S	8穴 左		100	
	54-25446S	8穴 右			
	54-25448S	5穴 左		73.8	
54-25450S	5穴 右				
	54-25420S	15穴 左	27.5	189	
	54-25422S	15穴 右			
	54-25424S	11穴 左		145	
	54-25426S	11穴 右			
	54-25428S	8穴 左		100	
	54-25430S	8穴 右			
	54-25432S	5穴 左		73.8	
	54-25434S	5穴 右			

尺側コラム用プレート*1				
サイズ	カタログ番号	種類	規格 (mm)	
			幅	長さ
	54-25402S	右	7 (遠位幅 13.5)	40
	54-25403S	左		
	54-25404S	右		52.7
	54-25405S	左		

橈側コラム用プレート*1			
サイズ	カタログ番号	規格 (mm)	
		幅	長さ
ショート	54-25400S	7	45
ロング	54-25401S		57.7

■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

医療機器承認番号

販売名

\*1 22100BZX01035000

バリアックス橈骨遠位端用ロッキングプレート

\*2 22300BZX00285000

バリアックス橈骨遠位用ロッキングプレート

# VariAx 2 Clavicle

## 鎖骨プレート

### プレートバリエーション及びプレート長:

- ・スーパーアローバンド - 75mm (6穴) ~ 122mm (10穴)
- ・スーパーハイバンド - 97mm (8穴) ~ 120mm (10穴)
- ・スーパーアラテラル - 74mm (3穴) ~ 122mm (7穴)
- ・アンテリアミッドシャフト - 75mm (6穴) ~ 118mm (10穴)
- ・アンテリアラテラル - 60mm (6穴) ~ 83mm (8穴)
- ・フックプレート - 68mm (5穴) ~ 111mm (9穴)



### プレート厚\*:

3mm (スーパーアプレート中央のみ3.3mm)

### プレート幅\*:

- シャフト - 11mm  
(アンテリアは遠位のみ10mm)
- スーパーアラテラル - 遠位 17mm
- フックプレート - 遠位 19mm



### フックプレート高:

12mm、16mm、20mm (フック長20mm)

### シンプルな手術手順:

2.7mm・3.5mmのスクリューが同じホールに使用可能です。

### 使用するスクリュースペック

スクリュー (T10, セルフタッピング)		
	ロックングスクリュー	ノンロックンスクリュー
サイズ	2.7mm/3.5mm	2.7mm/3.5mm
長さ	10mm-34mm	10mm-34mm
ドリル	2.0mm/2.6mm	2.0mm/2.6mm

製品リストはP.22を参照ください。



\*寸法は参考値です。

バリアックス鎖骨ロックングプレート

スーパーアローバンド*1			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
左	右		
628006S	628026S	75	6
628007S	628027S	88	7
628008S	628028S	99	8
628010S	628030S	122	10



スーパーアライハイバンド*1			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
左	右		
628108S	628128S	97	8
628110S	628130S	120	10



スーパーアラテラルプレート*1			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
左	右		
628203S	628223S	74	3
628204S	628224S	86	4
628205S	628225S	98	5
628207S	628227S	122	7



アンテリアミッドシャフトプレート*1			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
628306S			
628307S		86	7
628308S		97	8
628310S		118	10



アンテリアラテラルプレート*1			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
628406S			
628407S		72	7
628408S		83	8



バリアックス鎖骨フックプレート

フックプレート*2				
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)	フック高 (mm)
左	右			
628505S	628515S	68	5	12
628506S	628516S	79	6	12
628507S	628517S	90	7	12
628509S	628519S	111	9	12
628525S	628535S	68	5	16
628526S	628536S	79	6	16
628527S	628537S	90	7	16
628529S	628539S	111	9	16
628545S	628555S	68	5	20
628546S	628556S	79	6	20
628547S	628557S	90	7	20
628549S	628559S	111	9	20



■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

医療機器承認番号 販売名  
\*1 22400BZX00389000 バリアックス鎖骨ロックングプレート  
\*2 22800BZX00312000 バリアックス鎖骨フックプレート

# VariAx 2 Elbow

## 上腕骨遠位プレート

### プレートバリエーション及びプレート長:

- ・外側 - 73mm (2穴) ~ 156mm (8穴)
- ・外側後方 - 69mm (2穴) ~ 150mm (8穴)
- ・内側 - 68mm (3穴) ~ 139mm (8穴)
- ・内側エクステンデッド - 72mm (3穴) ~ 143mm (8穴)
- ・内側後方 - 80mm (3穴) ~ 151mm (8穴)
- ・肘頭 - 65mm (3穴) ~ 137mm (8穴)



### プレート厚\*:

3mm

### 症例に応じて、90°固定/180°固定と選択可能



### シンプルな手術手順:

2.7mm・3.5mmのスクリューが同じホールに使用可能です。

### 使用するスクリュースペック

スクリュー (T10, セルフタッピング)		
	ロッキングスクリュー	ノンロッキングスクリュー
サイズ	2.7mm/3.5mm	2.7mm/3.5mm
長さ	10mm-65mm	10mm-65mm
ドリル	2.0mm/2.6mm	2.0mm/2.6mm

製品リストはP.22を参照ください。



\*寸法は参考値です。

バリアックス上腕骨遠位ロックングプレート



内側プレート		
カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)
629383S	68	3
629384S	92	4
629386S	116	6
629388S	139	8



内側エクステンデッドプレート		
カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)
629283S	72	3
629284S	96	4
629286S	120	6
629288S	143	8



外側プレート			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
左	右		
629202S	629222S	73	2
629203S	629223S	85	3
629204S	629224S	109	4
629206S	629226S	132	6
629208S	629228S	156	8



内側後方プレート			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
左	右		
629303S	629323S	80	3
629304S	629324S	104	4
629306S	629326S	128	6
629308S	629328S	151	8



外側後方プレート			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
左	右		
629242S	629262S	69	2
629243S	629263S	81	3
629244S	629264S	105	4
629246S	629266S	128	6
629248S	629268S	150	8



肘頭プレート			
カタログ番号		全長 (mm)	規格 (穴数)
左	右		
629343S	629363S	65	3
629344S	629364S	89	4
629346S	629366S	113	6
629348S	629368S	137	8

# VariAx 2 Fibula フィブラプレート

## プレートバリエーション及びプレート長:

- ・ディスタルフィブラ
  - 77mm (3穴)~149mm (9穴)
- ・ディスタルフィブラストレート
  - 40.5mm (3穴)~156mm (12穴)

## プレート厚\*:

- シャフト部 - 2.0mm
- 遠位部 - 1.3mm

## プレート幅:

- シャフト部 - 10mm
- 遠位部 - 16mm


## シンプルな手術手順:

同一のドリル、ドライバーでロッキング・ノンロッキングスクリューを使用する事が可能です。



ディスタルフィブラストレートプレート

プレート厚 2.0mm  
プレート幅 10mm

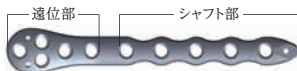

ディスタルフィブラプレート



3.5mm ロッキングスクリュー      3.5mm ノンロッキングスクリュー

## 使用するスクリュースペック

スクリュー (T10, セルフタッピング)		
	ロッキングスクリュー	ノンロッキングスクリュー
サイズ	3.5mm	3.5mm
長さ	10mm-34mm	10mm-50mm
ドリル	2.6mm	2.6mm

製品リストはP.22を参照ください。

\*寸法は参考値です。



パリアックス ディスタル フィブラ プレート*1		
カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)
4020903S	77	3
4020904S	89	4
4020905S	101	5
4020906S	113	6
4020907S	125	7
4020908S	137	8
4020909S	149	9



パリアックス ディスタルフィブラ ストレートプレート*2		
カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)
4020803S	40.5	3
4020804S	60	4
4020805S	72	5
4020806S	84	6
4020807S	96	7
4020808S	108	8
4020810S	132	10
4020812S	156	12

医療機器承認番号

販売名

\*1 22300BZX00227000

パリアックス ディスタル フィブラ プレート

\*2 22400BZX00392000

パリアックス ディスタル フィブラ ストレートプレート

# VariAx 2 Foot フットプレート



## 豊富なプレートバリエーション



T型プレート



カーブドプレート



ブロードストリート  
プレート



カルカーニール  
メッシュプレート\*



長方形型プレート



L型プレート



T型プレート



3Dプレート



H型プレート



カルカーニール  
スタンダードプレート

プレート厚:1.5mm

(\*カルカーニールメッシュプレート:1.0mm)

## 使用するスクリウスペック

スクリュー (T8/T10、セルフタッピング) 踵骨以外				
	ロッキングスクリュー		ノンロッキングスクリュー	
サイズ	2.7mm	3.5mm	2.7mm	3.5mm
長さ	8mm-40mm	10mm-40mm	8mm-40mm	14mm-36mm
ドリル	2.0mm	2.6mm	2.0mm	2.6mm



T8 2.7mm  
ロッキングスクリュー



T8 2.7mm  
ノンロッキングスクリュー



T10 3.5mm  
ロッキングスクリュー



T10 3.5mm  
ノンロッキングスクリュー

スクリュー (T10、セルフタッピング) 踵骨専用		
	ロッキングスクリュー	ノンロッキングスクリュー
サイズ	3.5mm	3.5mm
長さ	14mm-55mm	22mm-55mm
ドリル	2.6mm	2.6mm

製品リストはP.22, 23を参照ください。



フットプレート	
カタログ番号	品名 / 規格
 40-15011S	カーブドプレート 4穴
 40-15012S	カーブドプレート 5穴 右
 40-15013S	カーブドプレート 5穴 左
 40-15014S	カーブドプレート 6穴
 40-15021S	H型プレート スモール
 40-15022S	H型プレート ミディアム
 40-15023S	H型プレート ラージ
 40-15031S	長方形型コンプレッションプレート サイズ1
 40-15032S	長方形型ロッキングプレート サイズ2
 40-15033S	長方形型コンプレッションプレート サイズ2
 40-15041S	ブロードストレートプレート ショート
 40-15042S	ブロードストレートプレート ミディアム
 40-15043S	ブロードストレートプレート ロング
 40-15061S	3Dプレート 左
 40-15062S	3Dプレート 右
 40-15071S	オブリークT型プレート 左
 40-15072S	オブリークT型プレート 右
 40-15081S	T型プレート
 40-15091S	L型プレート 左
 40-15092S	L型プレート 右
 40-10102S	カルカーニールメッシュプレート スモール
 40-10104S	カルカーニールメッシュプレート ミディアム
 40-10112S	カルカーニールスタンダードプレート スモール
 40-10114S	カルカーニールスタンダードプレート ミディアム

医療機器承認番号

販売名

22200BZX00921000

パリアックスフットシステム

# VariAx 2 Compression コンプレッションプレート

## プレートバリエーション及びプレート長:

- ・ナロープレート - 54mm(4穴)~174mm(14穴)
- ・ワイドプレートストレート - 55mm(4穴)~175mm(14穴)
- ・ワイドプレートカーブ - 115mm(9穴)~175mm(14穴)

## プレート厚\*:

- ナロープレート - 3.3mm
- ワイドプレート - 3.0mm

## プレート幅:

- ナロープレート - 11.2mm
- ワイドプレート - 12.7mm



## 使用可能なスクリュー:

2.7mmと3.5mmのスクリューが使用可能です。 P.22を参照ください。

# VariAx 2 One Third Tubular 1/3 円プレート

## プレート長:


23mm(2穴)~191mm(16穴)

## プレート厚\*:

1.7mm

## プレート幅:

10.5mm

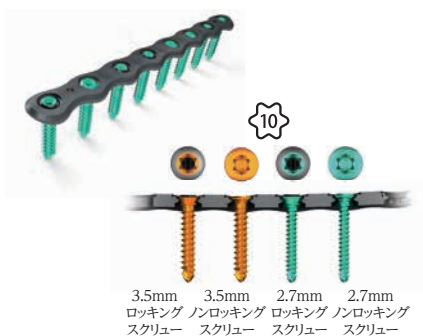

## 使用可能なスクリュー:

2.7mmと3.5mmのスクリューが使用可能です。 P.22を参照ください。 \*寸法は参考値です。

# VariAx 2 Compression コンプレッションプレート

(バリアックスコンプレッションプレート)

ナロープレート		
プレート長	ホール数	カタログ番号
54mm 長	4 穴	629504S
66mm 長	5 穴	629505S
78mm 長	6 穴	629506S
90mm 長	7穴ロックング2穴	629507S
90mm 長	7穴ロックング4穴	629527S
102mm 長	8 穴	629508S
114mm 長	9 穴	629509S
126mm 長	10 穴	629510S
150mm 長	12 穴	629512S
174mm 長	14 穴	629514S

ワイドプレート ストレート		
プレート長	ホール数	カタログ番号
55mm 長	4 穴	629544S
67mm 長	5 穴	629545S
79mm 長	6 穴	629546S
91mm 長	7穴ロックング2穴	629547S
91mm 長	7穴ロックング4穴	629537S
103mm 長	8 穴	629548S
115mm 長	9 穴	629549S
127mm 長	10 穴	629550S
151mm 長	12 穴	629552S
175mm 長	14 穴	629554S

ワイドプレート カーブ		
プレート長	ホール数	カタログ番号
115mm 長	9 穴	629559S
127mm 長	10 穴	629560S
139mm 長	11 穴	629561S
151mm 長	12 穴	629562S
175mm 長	14 穴	629564S

医療機器承認番号 販売名  
23000BZX00213000 バリアックスコンプレッションプレート

# VariAx 2 One Third Tubular 1/3円プレート

(バリアックス1/3円プレート)

バリアックス 1/3円プレート		
長さ	ホール数	カタログ番号
23mm	2 穴	626672S
35mm	3 穴	626673S
47mm	4 穴	626674S
59mm	5 穴	626675S
71mm	6 穴	626676S
83mm	7 穴	626677S
95mm	8 穴	626678S
107mm	9 穴	626679S

バリアックス 1/3円プレート		
長さ	ホール数	カタログ番号
119mm	10 穴	626680S
143mm	12 穴	626682S
167mm	14 穴	626684S
191mm	16 穴	626686S

■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

医療機器承認番号 販売名  
22900BZX00361000 バリアックス1/3円プレート

# VariAx Hand ハンドプレート

## プレート厚\*:

1.0mm (1.7mmスクリュー用)

1.5mm (2.3mmスクリュー用)

## ±10度振れるポリアクシャルロッキング:

ロッキングスクリューは垂直方向から最大±10度の範囲で振る事が可能です。

## 豊富なプレートバリエーション:

MCSロッキングプレートやローテーションプレートなど、骨折型に応じて使用できるラインナップがあります。



※VariAx Handは販売のみとなります。

\*寸法は参考値です。

バリアックスロッキングプレート S 1.7mmスクリュー用				
規格	品名	長さ	カタログ番号	
4穴	ストレート プレート	18mm	57-10304S	
16穴		64mm	57-10316S	
6穴 右	L-プレート	20mm	57-10320S	
6穴 左		20mm	57-10321S	
6穴	T-ナロー プレート	20mm	57-10340S	
10穴		36mm	57-10310S	
7穴	T-プレート	20mm	57-10360S	
8穴 ワイド		20mm	57-10368S	
9穴	Z-ナロー プレート 3D プレート	11mm	57-10390S	
2×2穴		17mm	57-10391S	
3×2穴		23mm	57-10392S	
4×2穴 移植用		21mm	57-10395S	
2×2+2穴		18mm	57-10397S	
5穴	ローテーション プレート	24mm	57-10380S	

バリアックスロッキングプレート M 2.3mmスクリュー用				
規格	品名	長さ	カタログ番号	
4穴	ストレート プレート	24mm	57-15301S	
4穴 パー付き		26mm	57-15302S	
16穴		100mm	57-15316S	
6穴 右	L-プレート	20mm	57-15320S	
6穴 左		20mm	57-15321S	
6穴	T-ナロー プレート	30mm	57-15340S	
8穴 ワイド	T-プレート	24mm	57-15361S	
7穴		24mm	57-15360S	
7穴	Y-ナロー プレート	36mm	57-15370S	
13穴	Z-ナロー プレート	43mm	57-15379S	
2×2穴	3D プレート	15mm	57-15390S	
3×2穴		25mm	57-15391S	
4×2穴		35mm	57-15392S	
4×2穴 移植用		30mm	57-15395S	
2×2+2穴		28mm	57-15397S	
5穴	ローテーション プレート	36mm	57-15385S	
5穴 左	MC5 プレート	33mm	57-15324S	
5穴 右		33mm	57-15325S	

※ VariAx Handは販売のみとなります。

1.7mm チタン製ロッキングスクリュー(クロスピン)			
長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
5mm	53-17005S	13mm	53-17013S
6mm	53-17006S	14mm	53-17014S
7mm	53-17007S	15mm	53-17015S
8mm	53-17008S	16mm	53-17016S
9mm	53-17009S	18mm	53-17018S
10mm	53-17010S	20mm	53-17020S
11mm	53-17011S	22mm	53-17022S
12mm	53-17012S	24mm	53-17024S

1.7mm チタン製スクリュー(クロスピン)			
長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
5mm	58-17005S	13mm	58-17013S
6mm	58-17006S	14mm	58-17014S
7mm	58-17007S	15mm	58-17015S
8mm	58-17008S	16mm	58-17016S
9mm	58-17009S	18mm	58-17018S
10mm	58-17010S	20mm	58-17020S
11mm	58-17011S	22mm	58-17022S
12mm	58-17012S	24mm	58-17024S

1.9mm エマーゼンシースクリュー(クロスピン)	
長さ	カタログ番号
5mm	58-19005S
8mm	58-19008S
10mm	58-19010S
12mm	58-19012S

2.3mm チタン製ロッキングスクリュー(クロスピン)			
長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
6mm	53-23006S	15mm	53-23015S
8mm	53-23008S	16mm	53-23016S
9mm	53-23009S	18mm	53-23018S
10mm	53-23010S	20mm	53-23020S
11mm	53-23011S	22mm	53-23022S
12mm	53-23012S	24mm	53-23024S
13mm	53-23013S	26mm	53-23026S
14mm	53-23014S		

2.3mm チタン製スクリュー(クロスピン)			
長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
6mm	58-23006S	15mm	58-23015S
8mm	58-23008S	16mm	58-23016S
9mm	58-23009S	18mm	58-23018S
10mm	58-23010S	20mm	58-23020S
11mm	58-23011S	22mm	58-23022S
12mm	58-23012S	24mm	58-23024S
13mm	58-23013S	26mm	58-23026S
14mm	58-23014S		

2.5mm エマーゼンシースクリュー(クロスピン)	
長さ	カタログ番号
6mm	58-25006S
8mm	58-25008S
10mm	58-25010S
12mm	58-25012S

※表記以外の長さのスクリューについてはお問い合わせ下さい。

医療機器承認番号 販売名  
22300BZX00051000 バリアックスハンドシステム

## VariAx 2 T10 Screw

フィブラ・鎖骨・上腕骨遠位・  
コンプレッション・1/3円・  
フット(3.5mm) 

ロックingscrew T10 2.7mm	
全長	カタログ番号
10mm	657010S
12mm	657012S
14mm	657014S
16mm	657016S
18mm	657018S
20mm	657020S
22mm	657022S
24mm	657024S
26mm	657026S
28mm	657028S
30mm	657030S
32mm	657032S
34mm	657034S
36mm	657036S
38mm	657038S
40mm	657040S
42mm	657042S
44mm	657044S
46mm	657046S
48mm	657048S
50mm	657050S
55mm	657055S
60mm	657060S
65mm	657065S

ノンロックingscrew T10 2.7mm	
全長	カタログ番号
10mm	657110S
12mm	657112S
14mm	657114S
16mm	657116S
18mm	657118S
20mm	657120S
22mm	657122S
24mm	657124S
26mm	657126S
28mm	657128S
30mm	657130S
32mm	657132S
34mm	657134S
36mm	657136S
38mm	657138S
40mm	657140S
42mm	657142S
44mm	657144S
46mm	657146S
48mm	657148S
50mm	657150S
55mm	657155S
60mm	657160S
65mm	657165S

ロックingscrew T10 3.5mm	
全長	カタログ番号
10mm	657310S
12mm	657312S
14mm	657314S
16mm	657316S
18mm	657318S
20mm	657320S
22mm	657322S
24mm	657324S
26mm	657326S
28mm	657328S
30mm	657330S
32mm	657332S
34mm	657334S
36mm	657336S
38mm	657338S
40mm	657340S
42mm	657342S
44mm	657344S
46mm	657346S
48mm	657348S
50mm	657350S
55mm	657355S
60mm	657360S
65mm	657365S

ノンロックingscrew T10 3.5mm	
全長	カタログ番号
10mm	657410S
12mm	657412S
14mm	657414S
16mm	657416S
18mm	657418S
20mm	657420S
22mm	657422S
24mm	657424S
26mm	657426S
28mm	657428S
30mm	657430S
32mm	657432S
34mm	657434S
36mm	657436S
38mm	657438S
40mm	657440S
42mm	657442S
44mm	657444S
46mm	657446S
48mm	657448S
50mm	657450S
55mm	657455S
60mm	657460S
65mm	657465S



※キット内容によりスクリュー構成は異なります。詳しくは営業にお問い合わせください。

# VariAx 2 T8 Screw

## 橈骨遠位端・フット(2.7mm)

ロッキングスクリュー T8 2.7mm (使用ドリル径2.0mm)	
長さ	カタログ番号
8mm	656308S
10mm	656310S
12mm	656312S
14mm	656314S
16mm	656316S
18mm	656318S
20mm	656320S
22mm	656322S
24mm	656324S
26mm	656326S
28mm	656328S
30mm	656330S
32mm	656332S
34mm	656334S
36mm	656336S
38mm	656338S
40mm	656340S
45mm	656345S
50mm	656350S




ノンロッキングスクリュー T8 2.7mm (使用ドリル径2.0mm)	
長さ	カタログ番号
8mm	656408S
10mm	656410S
12mm	656412S
14mm	656414S
16mm	656416S
18mm	656418S
20mm	656420S
22mm	656422S
24mm	656424S
26mm	656426S
28mm	656428S
30mm	656430S
32mm	656432S
34mm	656434S
36mm	656436S
38mm	656438S
40mm	656440S
45mm	656445S
50mm	656450S



ロッキングピン T8 2.0mm (使用ドリル径2.0mm)	
長さ	カタログ番号
16mm	656616S
18mm	656618S
20mm	656620S
22mm	656622S
24mm	656624S
26mm	656626S
28mm	656628S
30mm	656630S

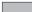

 は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

※キット内容によりスクリュー構成は異なります。  
詳しくは営業にお問い合わせください。

医療機器承認番号 販売名  
22600BZX00491000 バリアックス2スクリュー

**AxSOS**

---



上腕骨近位プレート  
P.26



コンプレッションプレート  
P.38



脛骨近位外側プレート  
P.30



大腿骨遠位プレート  
P.28




脛骨近位内側プレート  
P.32



脛骨遠位内側プレート  
P.36



脛骨遠位前外側プレート  
P.34

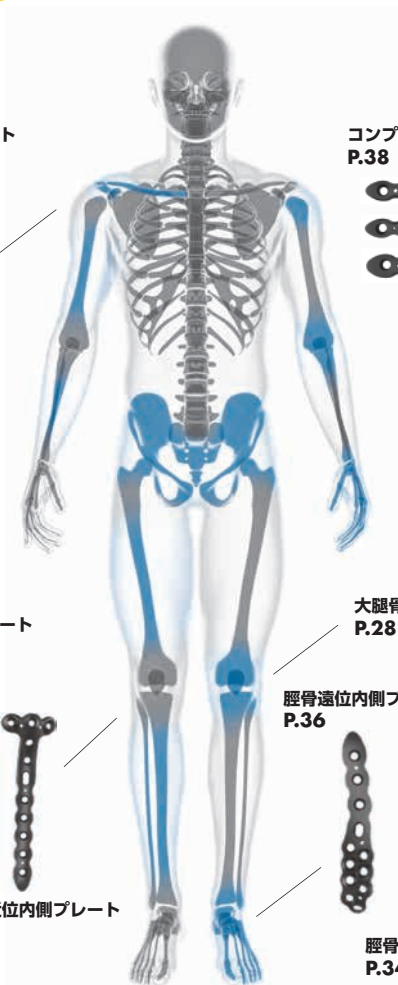

# AxSOS Proximal Humerus

## 上腕骨近位プレート

### プレート長:

86mm (3穴) ~ 228mm (14穴)

### プレート厚\*:

3.0mm

### 骨端部ホール数:

8穴 (7穴のユニバーサルホール)

### 器械:

4.0mm ORIF システム



### プレートの設置:

骨頭頂部より10mm遠位・結節間溝の外側に設置。  
これによりスクリューが骨質の良い後内側方向を中心とした位置に挿入されます。




### スーチャーホール:

最大8個のスーチャーホールがあります。必要に応じて  
大小結節に再固定を行う事で骨折の安定化をサポートします。



\*寸法は参考値です。

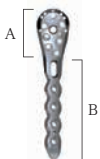

アックスTi 上腕骨近位プレート*1(滅菌)				
プレート長	ホール数		左	右
	A	B	カタログ番号	カタログ番号
86mm	8	3	627203S	627233S
99mm		4	627204S	627234S
112mm		5	627205S	627235S
125mm		6	627206S	627236S
151mm		8	627208S	627238S
176mm		10	627210S	627240S
202mm		12	627212S	627242S
228mm		14	627214S	627244S

4.0mmスクリュー(T15)					
長さ	アックス ロッキングスクリュー 径 4.0mm *2	アックス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm *2	アックス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm *2	長さ	アックス 皮質骨スクリュー シャフト付き 径 3.5mm *2
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm	661624S
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm	661626S
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm	661628S
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm	661630S
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm	661632S
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm	661634S
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm	661636S
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm	661638S
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm	661640S
32mm	661032S	661432S	607332S		
34mm	661034S	661434S	607334S		
36mm	661036S	661436S	607336S		
38mm	661038S	661438S	607338S		
40mm	661040S	661440S	607340S		
42mm	661042S	661442S	607342S		
44mm	661044S	661444S	607344S		
46mm	661046S	661446S	607346S		
48mm	661048S	661448S	607348S		
50mm	661050S	661450S	607350S		
55mm	661055S	661455S	607355S		
60mm	661060S	661460S	607360S		
65mm	661065S	661465S	607365S		
70mm	661070S	661470S	607370S		
75mm	661075S	661475S	607375S		
80mm	661080S	661480S	607380S		
85mm	661085S	661485S	607385S		
90mm	661090S	661490S	607390S		
95mm	661095S	661495S	607395S		

■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

※キット内容によりスクリュー構成は異なります。  
詳しくは営業にお問い合わせください。

医療機器承認番号

販売名

\*1 22700BZX00386000 AxSOS Ti Humerusロッキングプレートシステム

\*2 22500BZX00443000 AxSOS Ti Tibiaロッキングプレートシステム

# AxSOS Distal Femur

## 大腿骨遠位プレート

### プレート長:

130mm(4穴)~343mm(16穴)

### プレート厚\*:

シャフト部 - 5.3mm

骨端部 - 3.7mm

### 骨端部ホール数:

8穴(6穴のユニバーサルホール)

### 曲率半径\*:

1.8m

### 器械:


5.0mm ORIF システム

5.0mm ターゲティングデバイス


### プレートの設置:

プレート遠位端が、関節面から約5 - 10mmの位置に来るよう設置することで直接関節面を支える位置にスクリューが向かうことが確認できます。骨端のスクリューはプレート部から97°の角度が付き挿入されます。

また、プレート設置位置はCondyleが位置する平面から約15°傾いています。イメージをTrue Lateralで見る場合は、Condyleが位置する平面で照射します。プレート設置位置の傾斜を矯正するためには、イメージを15°傾けていただく必要があります。

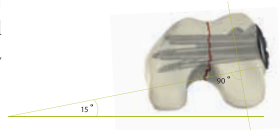

\*寸法は参考値です。

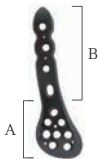

AxSOS Ti 大腿骨遠位プレート(滅菌)				
プレート長	ホール数		左	右
	A	B	カタログ番号	カタログ番号
130mm	8	4	627604S	627634S
166mm		6	627606S	627636S
202mm		8	627608S	627638S
238mm		10	627610S	627640S
274mm		12	627612S	627642S
310mm		14	627614S	627644S
343mm		16	627616S	627646S

5.0mmスクリュー(T20)								
長さ	AxSOS ロッキング スクリュー 径 5.0mm	AxSOS 皮質骨 スクリュー 径 4.5mm	長さ	AxSOS 海綿骨 スクリュー 径 6.0mm	長さ	AxSOS 皮質骨 スクリュー シャフト付き 径 4.5mm	長さ	AxSOS ペリプロス セティック ロッキング スクリュー 径5.0mm
14mm	661114S	661714S	30mm	608230S	28mm	661928S	8mm	661308S
16mm	661116S	661716S	35mm	608235S	30mm	661930S	10mm	661310S
18mm	661118S	661718S	40mm	608240S	32mm	661932S	12mm	661312S
20mm	661120S	661720S	45mm	608245S	34mm	661934S	14mm	661314S
22mm	661122S	661722S	50mm	608250S	36mm	661936S	16mm	661316S
24mm	661124S	661724S	55mm	608255S	38mm	661938S	18mm	661318S
26mm	661126S	661726S	60mm	608260S	40mm	661940S	20mm	661320S
28mm	661128S	661728S	65mm	608265S				
30mm	661130S	661730S	70mm	608270S				
32mm	661132S	661732S	75mm	608275S				
34mm	661134S	661734S	80mm	608280S				
36mm	661136S	661736S	85mm	608285S				
38mm	661138S	661738S	90mm	608290S				
40mm	661140S	661740S	95mm	608295S				
42mm	661142S	661742S						
44mm	661144S	661744S						
46mm	661146S	661746S						
48mm	661148S	661748S						
50mm	661150S	661750S						
55mm	661155S	661755S						
60mm	661160S	661760S						
65mm	661165S	661765S						
70mm	661170S	661770S						
75mm	661175S	661775S						
80mm	661180S	661780S						
85mm	661185S	661785S						
90mm	661190S	661790S						
95mm	661195S	661795S						

■は、オプションサイズです。  
 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。  
 ※キット内容によりスクリュー構成は異なります。  
 詳しくは営業にお問い合わせください。

# AxSOS Proximal Lateral Tibia 脛骨近位外側プレート

## プレート長:

95mm(2穴)~251mm(14穴)

## プレート厚\*:

3.3mm

## 骨端部ホール数:

7穴(5穴のユニバーサルホール)

※ターゲティングデバイスを設置するホールへのスクリュー刺入はできません。


## 器械:

4.0mm ORIF システム


4.0mm ターゲティングデバイス

## プレートの設置:

プレートは関節面に近い脛骨外側方向に設置します。プレートと脛骨の骨端部のカーブが一致するようにします。ただし過度な上方設置による関節内への突出に注意します。

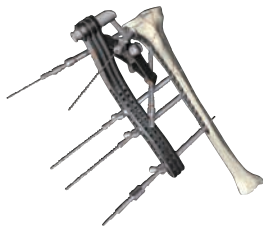

\*寸法は参考値です。

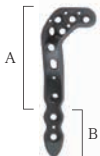

AxSOS Ti 脛骨近位外側プレート(滅菌)				
プレート長	ホール数		左	右
	A	B	カタログ番号	カタログ番号
95mm	8	2	627302S	627332S
121mm		4	627304S	627334S
147mm		6	627306S	627336S
173mm		8	627308S	627338S
199mm		10	627310S	627340S
225mm		12	627312S	627342S
251mm		14	627314S	627344S

4.0mmスクリュー(T15)					
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm	長さ	アクソス 皮質骨スクリュー シャフト付き 径 3.5mm
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm	661624S
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm	661626S
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm	661628S
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm	661630S
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm	661632S
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm	661634S
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm	661636S
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm	661638S
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm	661640S
32mm	661032S	661432S	607332S		
34mm	661034S	661434S	607334S		
36mm	661036S	661436S	607336S		
38mm	661038S	661438S	607338S		
40mm	661040S	661440S	607340S		
42mm	661042S	661442S	607342S		
44mm	661044S	661444S	607344S		
46mm	661046S	661446S	607346S		
48mm	661048S	661448S	607348S		
50mm	661050S	661450S	607350S		
55mm	661055S	661455S	607355S		
60mm	661060S	661460S	607360S		
65mm	661065S	661465S	607365S		
70mm	661070S	661470S	607370S		
75mm	661075S	661475S	607375S		
80mm	661080S	661480S	607380S		
85mm	661085S	661485S	607385S		
90mm	661090S	661490S	607390S		
95mm	661095S	661495S	607395S		

■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

※キット内容によりスクリュー構成は異なります。  
詳しくは営業にお問い合わせください。

# AxSOS Proximal Medial Tibia 脛骨近位内側プレート

## プレート長:

71mm(4穴)~227mm(16穴)

## プレート厚\*:

シャフト部 - 3.3mm

骨端部 - 2.4mm

## 骨端部ホール数:

5穴(4穴のユニバーサルホール)

## 器械:

4.0mm ORIF システム

## プレートの設置:

プレートは内側~後内側に設置します。外側プレートが設置されている場合は、K-ワイヤーを使用しスクリュー位置を確認します。



\*寸法は参考値です。





アクソスTi 脛骨近位内側プレート(滅菌)				
プレート長	ホール数		左	右
	A	B	カタログ番号	カタログ番号
71mm	3	4	627704S	627734S
97mm		6	627706S	627736S
123mm		8	627708S	627738S
149mm		10	627710S	627740S
175mm		12	627712S	627742S
201mm		14	627714S	627744S
227mm		16	627716S	627746S

4.0mmスクリュー(T15)					
長さ	アクソス ロックングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm	長さ	アクソス 皮質骨スクリュー シャフト付き 径 3.5mm
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm	661624S
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm	661626S
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm	661628S
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm	661630S
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm	661632S
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm	661634S
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm	661636S
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm	661638S
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm	661640S
32mm	661032S	661432S	607332S		
34mm	661034S	661434S	607334S		
36mm	661036S	661436S	607336S		
38mm	661038S	661438S	607338S		
40mm	661040S	661440S	607340S		
42mm	661042S	661442S	607342S		
44mm	661044S	661444S	607344S		
46mm	661046S	661446S	607346S		
48mm	661048S	661448S	607348S		
50mm	661050S	661450S	607350S		
55mm	661055S	661455S	607355S		
60mm	661060S	661460S	607360S		
65mm	661065S	661465S	607365S		
70mm	661070S	661470S	607370S		
75mm	661075S	661475S	607375S		
80mm	661080S	661480S	607380S		
85mm	661085S	661485S	607385S		
90mm	661090S	661490S	607390S		
95mm	661095S	661495S	607395S		

■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

※キット内容によりスクリュー構成は異なります。  
詳しくは営業にお問い合わせください。

# AxSOS Distal Anterolateral Tibia 脛骨遠位前外側プレート

## プレート長:

102mm(4穴)~229mm(14穴)

## プレート厚\*:

シャフト部 - 3.0mm

骨端部 - 2.3mm

遠位端部 - 1.3mm

## 骨端部ホール数:

10穴(7穴のユニバーサルホール)

※エイミングブロックを設置するホールへのスクリュー  
刺入はできません。

## 器械:


4.0mm ORIF システム

## プレートの設置:

骨端部が前方、シャフト部は外側になる様設置  
します。最遠位のスクリューは3.5mm皮質骨スクリュー  
と4.0mm海綿骨スクリューの刺入が可能です。



\*寸法は参考値です。

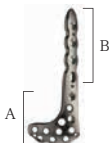

アクソスTi 脛骨遠位前外側プレート(滅菌)				
プレート長	ホール数		左	右
	A	B	カタログ番号	カタログ番号
102mm	11	4	627454S	627484S
127mm		6	627456S	627486S
153mm		8	627458S	627488S
178mm		10	627460S	627490S
203mm		12	627462S	627492S
229mm		14	627464S	627494S

4.0mmスクリュー (T15)					
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm	長さ	アクソス 皮質骨スクリュー シャフト付き 径 3.5mm
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm	661624S
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm	661626S
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm	661628S
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm	661630S
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm	661632S
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm	661634S
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm	661636S
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm	661638S
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm	661640S
32mm	661032S	661432S	607332S		
34mm	661034S	661434S	607334S		
36mm	661036S	661436S	607336S		
38mm	661038S	661438S	607338S		
40mm	661040S	661440S	607340S		
42mm	661042S	661442S	607342S		
44mm	661044S	661444S	607344S		
46mm	661046S	661446S	607346S		
48mm	661048S	661448S	607348S		
50mm	661050S	661450S	607350S		
55mm	661055S	661455S	607355S		
60mm	661060S	661460S	607360S		
65mm	661065S	661465S	607365S		
70mm	661070S	661470S	607370S		
75mm	661075S	661475S	607375S		
80mm	661080S	661480S	607380S		
85mm	661085S	661485S	607385S		
90mm	661090S	661490S	607390S		
95mm	661095S	661495S	607395S		

■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

※キット内容によりスクリュー構成は異なります。  
詳しくは営業にお問い合わせください。

# AxSOS Distal Medial Tibia 脛骨遠位内側プレート

## プレート長:

97mm(4穴)~227mm(14穴)

## プレート厚\*:

シャフト部 - 3.3mm

骨端部 - 2.3mm

遠位端部 - 1.3mm

## 骨端部ホール数:

8穴(7穴のユニバーサルホール)

## 器械:


4.0mm ORIF システム

## プレートの設置:

プレートの遠位端部が内果に向くよう設置します。



\*寸法は参考値です。

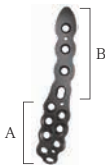

アクソスTi 脛骨遠位内側プレート(滅菌)				
プレート長	ホール数		左	右
	A	B	カタログ番号	カタログ番号
97mm	8	4	627404S	627434S
123mm		6	627406S	627436S
149mm		8	627408S	627438S
175mm		10	627410S	627440S
201mm		12	627412S	627442S
227mm		14	627414S	627444S

4.0mmスクリュー (T15)					
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm	長さ	アクソス 皮質骨スクリュー シャフト付き 径 3.5mm
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm	661624S
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm	661626S
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm	661628S
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm	661630S
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm	661632S
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm	661634S
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm	661636S
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm	661638S
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm	661640S
32mm	661032S	661432S	607332S		
34mm	661034S	661434S	607334S		
36mm	661036S	661436S	607336S		
38mm	661038S	661438S	607338S		
40mm	661040S	661440S	607340S		
42mm	661042S	661442S	607342S		
44mm	661044S	661444S	607344S		
46mm	661046S	661446S	607346S		
48mm	661048S	661448S	607348S		
50mm	661050S	661450S	607350S		
55mm	661055S	661455S	607355S		
60mm	661060S	661460S	607360S		
65mm	661065S	661465S	607365S		
70mm	661070S	661470S	607370S		
75mm	661075S	661475S	607375S		
80mm	661080S	661480S	607380S		
85mm	661085S	661485S	607385S		
90mm	661090S	661490S	607390S		
95mm	661095S	661495S	607395S		

■は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

※キット内容によりスクリュー構成は異なります。  
詳しくは営業にお問い合わせください。

# AxSOS Compression コンプレッションプレート

アクソスコンプレッションプレートは通常の長管骨骨折だけでなく、人工関節置換後骨折や偽関節、骨減少性骨への手術や骨切りなどに使用できます。

## プレートバリエーション及びプレート長:

- ・4mmコンプレッションプレート - 32mm (2穴)~162mm (12穴)
- ・5mmコンプレッションプレートナロー - 43mm (2穴)~295mm (16穴)
- ・5mmコンプレッションプレートワイド - 119mm (6穴)~299mm (16穴)

## プレート厚\*:

- 4mmコンプレッションプレート - 3.3mm
- 5mmコンプレッションプレートナロー - 5.2mm
- 5mmコンプレッションプレートワイド - 5.2mm



## プレート幅:

- 4mmコンプレッションプレート - 10.4mm
- 5mmコンプレッションプレートナロー - 13.6mm
- 5mmコンプレッションプレートワイド - 17.5mm

## 4mmシステム用スクリュー



## 5mmシステム用スクリュー



※4.0mmは上腕骨近位/脛骨用、5.0mmは大腿骨用と同じスクリューを使用します。

\*寸法は参考値です。



コンプレッションプレート 4mm システム用		
プレート長	ホール数	カタログ番号
32mm	2	627502S
45mm	3	627503S
58mm	4	627504S
71mm	5	627505S
84mm	6	627506S
97mm	7	627507S
110mm	8	627508S
123mm	9	627509S
136mm	10	627510S
149mm	11	627511S
162mm	12	627512S



コンプレッションプレート ナロー 5mm システム用		
プレート長	ホール数	カタログ番号
43mm	2	627532S
61mm	3	627533S
79mm	4	627534S
97mm	5	627535S
115mm	6	627536S
133mm	7	627537S
151mm	8	627538S
169mm	9	627539S
187mm	10	627540S
223mm	12	627542S
259mm	14	627544S
295mm	16	627546S



コンプレッションプレート ワイド 5mm システム用		
プレート長	ホール数	カタログ番号
119mm	6	627566S
137mm	7	627567S
155mm	8	627568S
173mm	9	627569S
191mm	10	627570S
209mm	11	627571S
227mm	12	627572S
245mm	13	627573S
263mm	14	627574S
299mm	16	627576S

■ は、オプションサイズです。  
使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

医療機器承認番号 販売名  
22900BZX00103000 AxSOS Ti コンプレッションプレートシステム

# オスフェリオン 60 SYK

## 製品特徴


### 強度の向上により補填部の支持性を補強

- 気孔率を60%に設定し、初期強度が約20MPa\*に向上
- 補填部への圧入補填が可能になり、症例選択の幅が拡大

\*平均値:オリンパステルモバイオマテリアル株式会社  
社内参考データ

### 骨形成を促進しながら吸収される骨置換材

- 高純度国産 $\beta$ -TCPを成分とした材料
- 優れた生体親和性と骨伝導能
- マクロ気孔とミクロ気孔による連通性

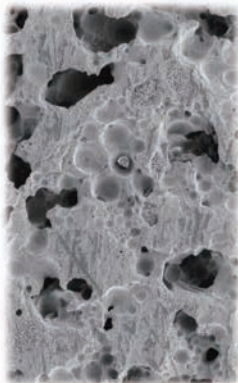

## 規格

**$\beta$ -TCP**

分子式	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
分子量	310.18
一般名	$\beta$ -リン酸三カルシウム

外観・性状	白色を呈する多孔質体
気孔率	約60%
気孔径	100~400 $\mu\text{m}$




# オスフェリオン 60 SYK

## ブロック体

汎用型・吸収型 (多孔体・一般型)

略称:人工骨 AB-06

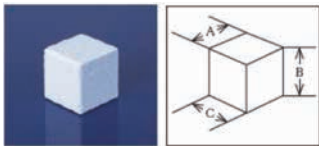


型番	寸法 (mm)		
	A	B	C
SYK60A1	10	10	10
SYK60A2	20	10	10

## 顆粒

汎用型・吸収型 (顆粒・フィラー)

略称:人工骨 AB-05

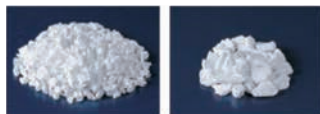


60G2-5                      60G3-2  
G2( $\phi$ 1.0~3.0mm)-5g    G3( $\phi$ 2.8~5.0mm)-2g

型番	規格
SYK60G2-5	$\phi$ 1.0~3.0mm ・ 5g
SYK60G3-2	$\phi$ 2.8~5.0mm ・ 2g

## 円筒体

汎用型・吸収型 (多孔体・一般型)

略称:人工骨 AB-06

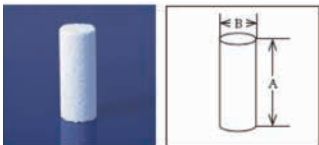

型番	寸法 (mm)	
	A	B
SYK60B0820	20	8

医療機器承認番号      販売名  
21800BZZ110045000    骨補填材    オスフェリオン60

製造販売元:  
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-50-1 Daiwa笹塚タワー  
<http://www.biomaterial.co.jp>





## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IF1-78-Rev1

NY/IB 1.5m 03/22

Copyright © 2022 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

**日本ストライカー株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)